

指先であなただの健康度がわかります。

# BC チェッカー<sup>®</sup> Ver. 7.00

BLOOD CIRCULATION CHECKER

加速度脈波計



FUTURE WAVE

糖尿病患者，脳梗塞・心筋梗塞患者，妊娠中毒症・更年期障害等の患者さんへの投薬効果，施術効果の確認に御使用下さい。向上効果が定量的に把握出来ます。診療報酬についても承認済みです。

## BC チェッカーの操作法


### (1)年齢、性別の登録

血液循環の機能は年齢によつて変化します。BCチェッカーの測定結果に関するコメントが必要な場合には、年齢、性別の登録を行ってください。年齢、性別の登録をしなくても、測定は可能ですが年齢に応じたコメントが表示されません。

### (2)測定の開始と終了

被測定者が安静である事が必要です。被測定者が移動等で身体を動かした後であれば、測定場所の椅子に座った後、数分間安静にした後に測定を行って下さい。被測定者は用意されている椅子に深く座り、BCチェッカーが置かれている机の端まで身を寄せます。右腕の肘から指の先まで、机の上にゆったり乗せる姿勢で測定を行います。測定は20秒程度で終了します。

### (3)測定終了後の画面及び印刷シート

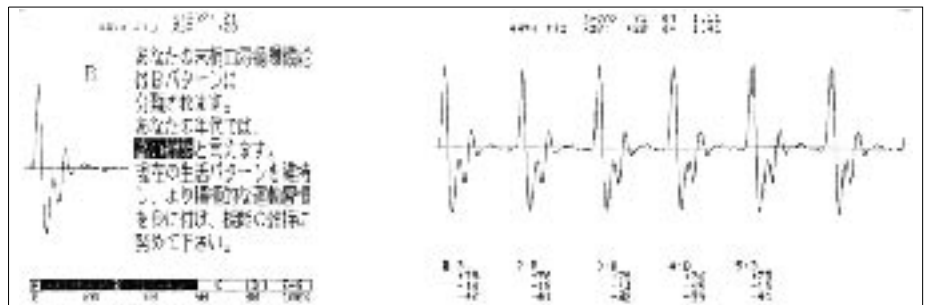

## 仕様

(1)測定部	本体に内蔵した拡散透過方式光学センサー 外部センサーにより測定	(5)消費電流	70mA以下
(2)操作部	「電源」スイッチ(シーソースイッチ) 「登録」選択、「測定」スイッチ(押ボタン スイッチ)	(6)使用環境	室内において使用 室温 25 ± 10 湿度 90%以下(結露しないこと)
(3)表示部	バックライト付き液晶パネル 240×440ドット	(7)本体寸法	218W×187D×55H
(4)電源	専用ACアダプター使用 入力 AC 90～115V, 50/60Hz 出力 DC 12V, 300mA	(8)重量	本 体 860g ACアダプター 260g
		医療用具許可番号	13BZ610号
		特許、実用新案	意匠登録申請中

## 診療報酬

区分：D214，検査項目：脈波図，心機図，ポリグラフ検査

実施料(2誘導)：100点，判断断：140点，合計：240点(1回/月)

病名例：糖尿病，心筋梗塞，脳梗塞，異常妊娠，妊娠中毒症等

下記にお問い合わせ下さい。

開発・製造元



未来への潮流  
株式会社 フューチャー・ウエイブ

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中3-2-17

TEL 03-5946-5922 FAX 03-5946-5923

URL <http://www.bcchecker.com>